

TECAR 1.0 ACTION GLOBALE



Vous pilotez l'électrode MOBILE afin de découpler l'action de votre massage. Le massage offre toute sa dimension en profondeur. La distance entre les deux électrodes est importante et offre des traitements sur un large segment polyarticulaire comme les membres inférieurs. Le confort du patient est indéniable : installé sur votre table de massage, il se détend et vous laisse toute la latitude pour travailler en profondeur

+ TECAR 1.0

TECAR 2.0 ACTION ASSISTEE



Vous posez une électrode FIXE RET sur le patient vous laissant toute liberté d'action avec vos deux mains libres.

La TECAR 2.0 est la version « couteau suisse » de l'énergie WINBACK où il y a tout simplement tellement de scénarios qu'il nous est impossible de tous les décrire. 3 exemples de traitements types utilisés couramment par vos confrères.

+ TECAR 2.0

TECAR 3.0 ACTION MOBILITE



Vous travaillez avec deux électrodes actives. L'énergie Winback est émise entre vos deux mains. Cette application est notamment très efficace pour aborder des articulations dites complexes comme l'épaule. Cette mobilité de l'énergie permet d'aborder une lésion sous tous les plans. Ainsi tous les axes de mouvements de l'épaule seront atteints en quelques minutes avec un confort inégalé. Votre expertise s'exprimera dans toutes les dimensions.

+ TECAR 3.0

TECAR 4.0 ACTION LOCALISEE



TECAR 4.0 de Winback repose sur la technologie de haute fréquence MIX où les deux électrodes au contact du patient sont regroupées en 1 seule. MIX offre une énergie concentrique et superficielle avec une réaction tissulaire immédiate.

TECAR 4.0 Les deux électrodes ont été intégrées dans une seule électrode afin de concentrer l'énergie sur de petites zones du corps sans pour autant nécessiter beaucoup de puissance. Avec 3 ou 6 pôles, ce mode se présente avec

des pôles émetteurs / récepteurs dans l'électrode qui sont sollicités par couple avec un algorithme très élaboré.

Ce mode offre une électrode manuelle avec plusieurs pôles dynamiques qui passent successivement en émission ou réception de courant. Deux pôles sont actifs simultanément. La quantité d'énergie est optimale pour une stimulation cellulaire sur une surface de quelques centimètres.

6X
PLUS RAPIDE

Cette technologie est issue du monde de la médecine esthétique pour une stimulation rapide, efficace et locale des tissus cutanés. Les études ont démontrées que la technologie MIX stimule en moins de 30 secondes les tissus en y apportant les mêmes effets vasculaires, antalgiques et cicatriciels qu'un traitement classique TECAR 1.0 de 3 minutes.

3X
MOINS D'ENERGIE

L'autre atout de la technologie MIX est son incroyable rendement d'énergie concentrée, ce qui lui permet un rendement équivalent à une Tecar 1.0 avec 3 fois moins d'énergie.



Exemple de pathologies. Pour certaines pathologies localisées, il est nécessaire d'un surcroît d'énergie focalisée pour traiter comme des aponévroses, des adhérences de cicatrisés ou bien encore des tendinopathies superficielles, les troubles lymphatiques (sans compression), Maladie de Dupuytren, Traitement post opératoire de la main et d du pied, périostite tibiale et les imperfections esthétiques.



MIX3 offre une électrode main avec 3 pôles dynamiques qui passent successivement en émission ou réception de courant. Deux pôles sur 3 sont actifs simultanément. Il existe deux tailles de MIX3: Body et Focus suivant la taille de la zone à traiter ou de la fragilité de son épiderme. MIX3 est dédié aux couches superficielles du derme.

TECAR 5.0 MODE INTELLIGENT

3 ELECTRODES POUR RÉPARTIR L'ÉNERGIE

Une fois de plus, WINBACK marque sa différence avec la nouvelle TECAR 5.0. Trois électrodes sont au contact du patient avec une émission de l'énergie au travers de deux électrodes mobiles ou fixes. Cette nouvelle fonctionnalité permet de diffuser une énergie équilibrée sur deux membres et ainsi de traiter deux jambes en même temps. Une autre configuration offre la possibilité d'un travail à deux mains actives pour votre massage... Soyez encore plus rapide et plus efficace dans votre traitement.

La TECAR 5.0 existe en 2 versions : TECAR 5 RET ou TECAR 5 MIX

